


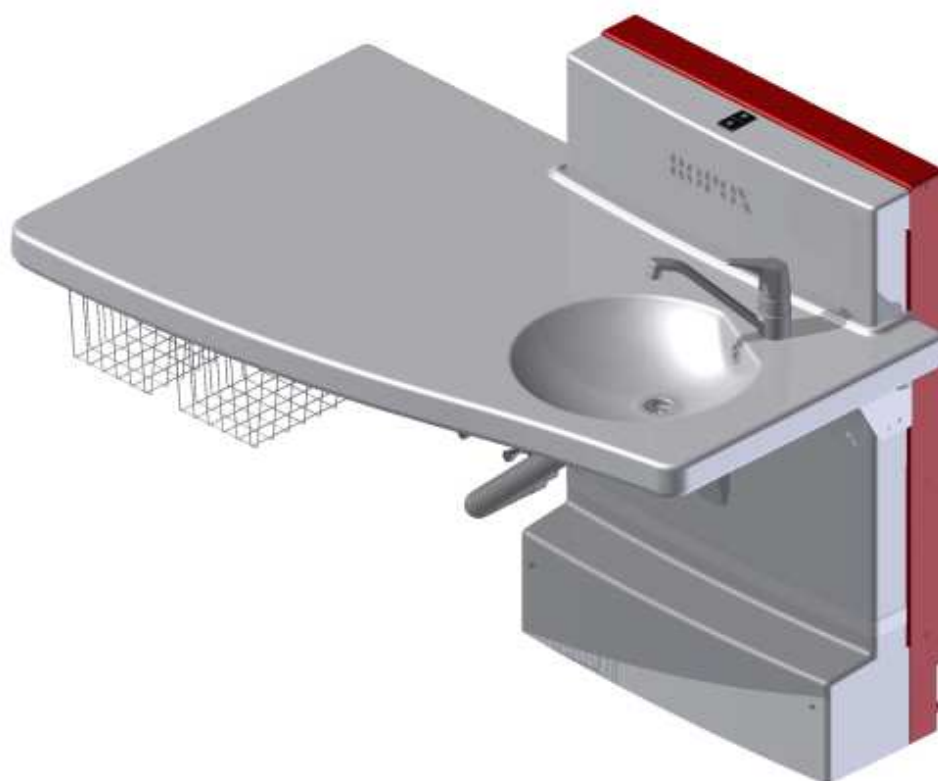

# Adapterraamme for Puslebord Maxi 2

## Brugermanual

## Montagevejledning

Denne manual skal altid ledsage produktet

# Indholdsfortegnelse

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Generelle oplysninger ..... | 3  |
| Montagevejledning .....     | 5  |
| Servicering.....            | 8  |
| Reklamationer.....          | 10 |

# Generelle oplysninger

## Produktinformation



Det er vigtigt at læse denne manual inden montage og ibrugtagning.


Produkt : Adapterramme for Puslebord Maxi 2

Producent : Ropox, DK-4700 Næstved, Tel. +45 55 75 05 00


Anvendelsesområde – bruges hvis eksisterende installationer skal føres bag ved løfteunitten.

Varenumre

| Længde af puslebord | Varenr.  |
|---------------------|----------|
| 90 cm og 130 cm     | 50-50686 |

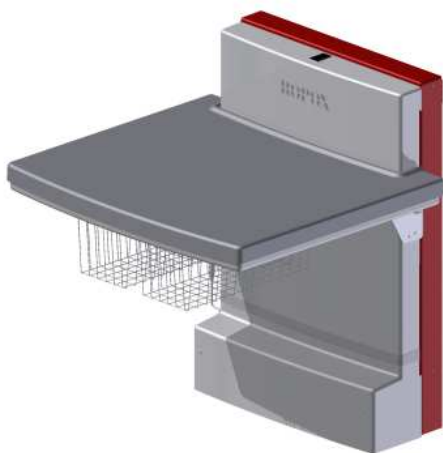

Puslebord Maxi 2, 90 cm

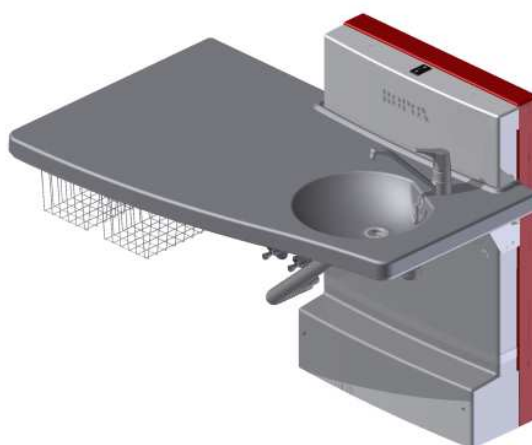

Puslebord Maxi 2, 130 cm

## Generelle oplysninger

---

### Tekniske data

Materiale – ramme: Svejste stålrør og stålplade St.37,  
Overfladebehandling: Pulverlakeret, hvid RAL 9010 mat, chromat


### Før brug

Inden ibrugtagning af dette produkt er det vigtigt, at montagevejledningen er fulgt nøje og at alle bolte og møtrikker er spændt.


## Montagevejledning

Vigtige oplysninger før montage

Målskitse af Pusleborde med monteret adapterramme.

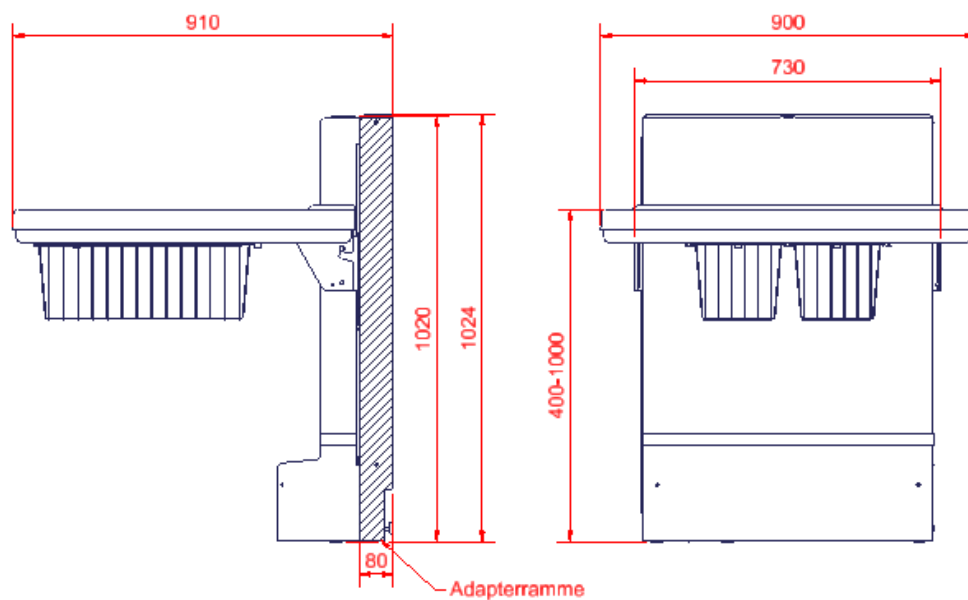

Puslebord Maxi 2, 90 cm

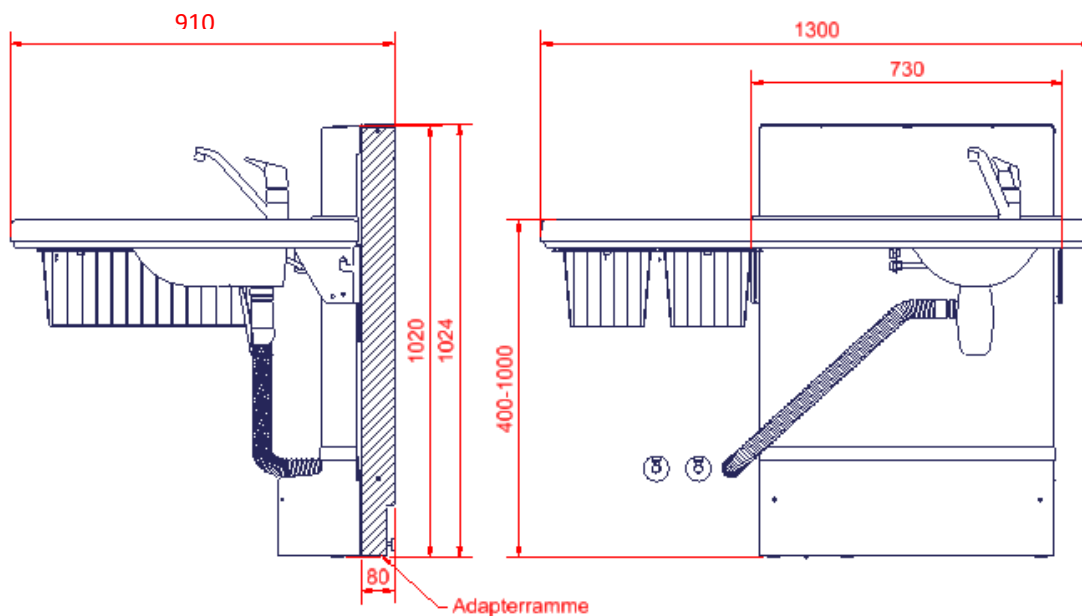

Puslebord Maxi 2, 130


## Montagevejledning

Til denne montagevejledning medfølger:

Adapterramme x1






Stilleskrue forlænger x2

Målskitse af adapterramme:



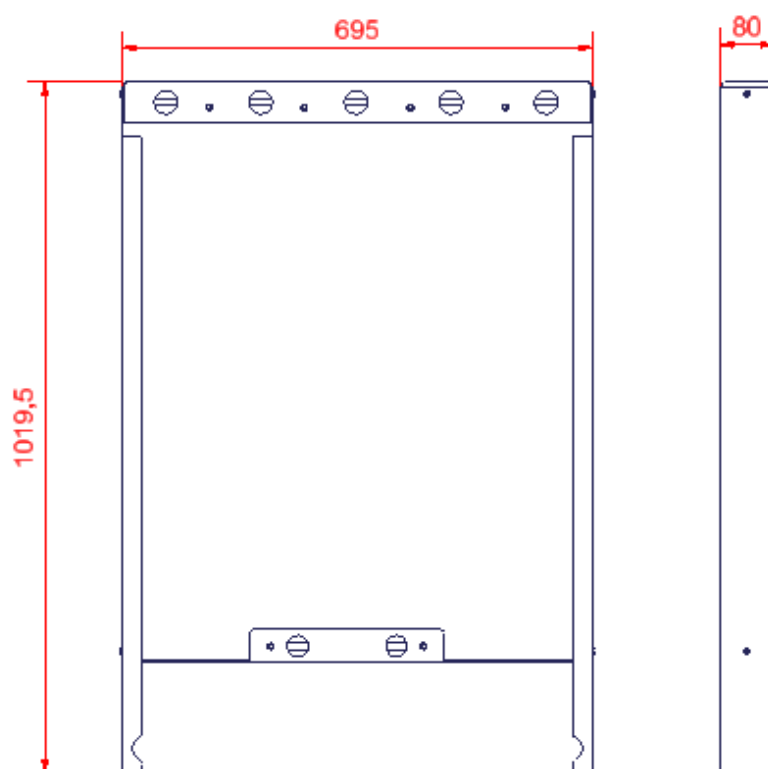


## Montagevejledning




Monter først adapterramme på væggen, følg derefter montagevejledning fra Maxi 2 puslebord.

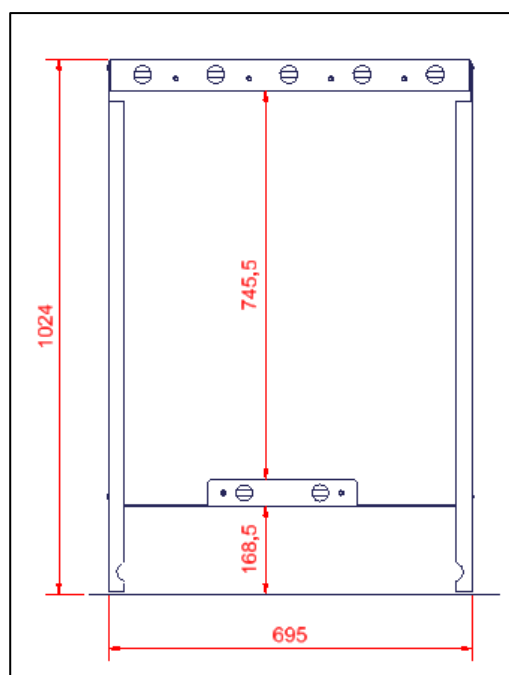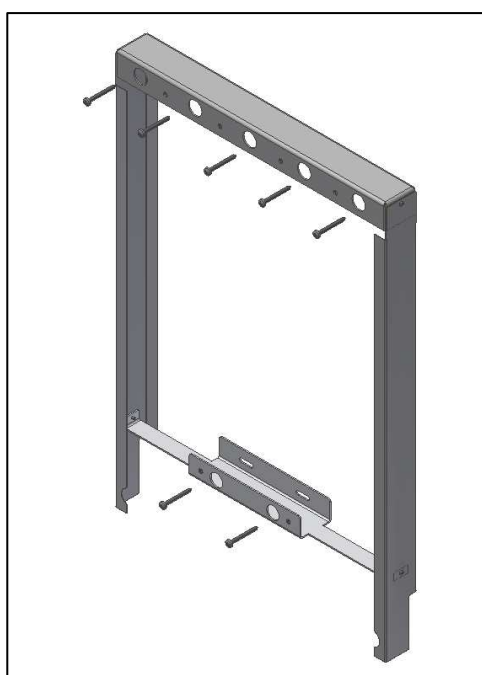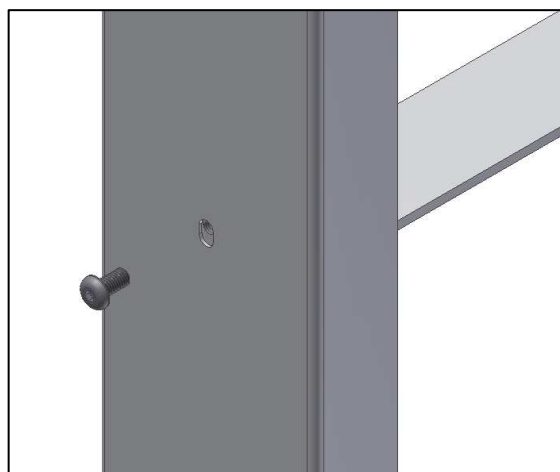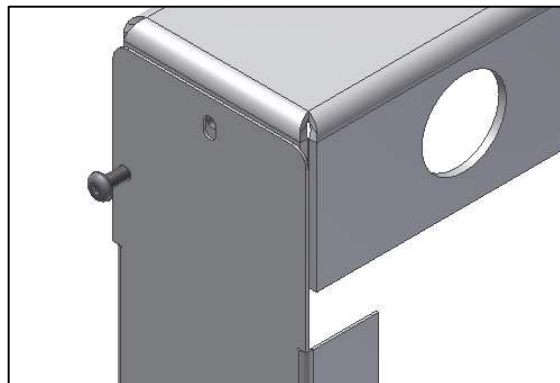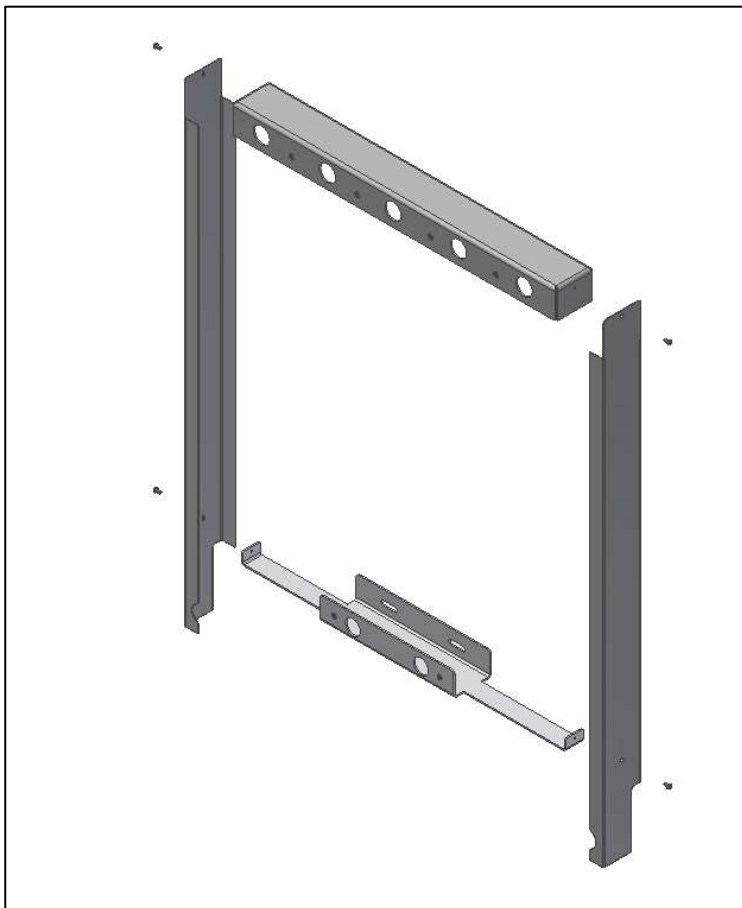

## Montagevejledning

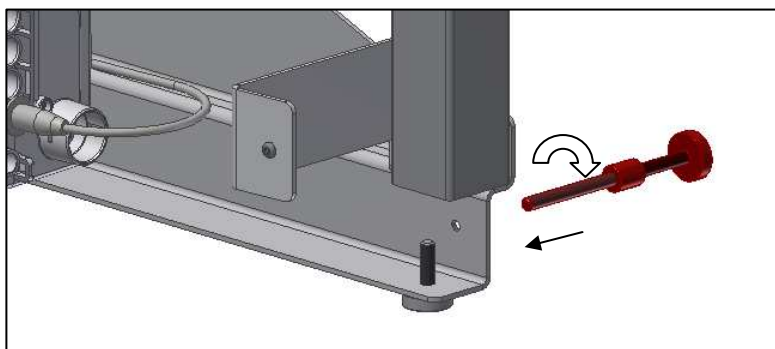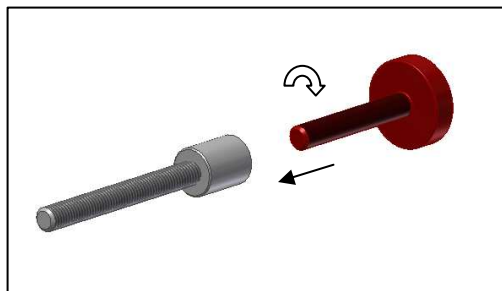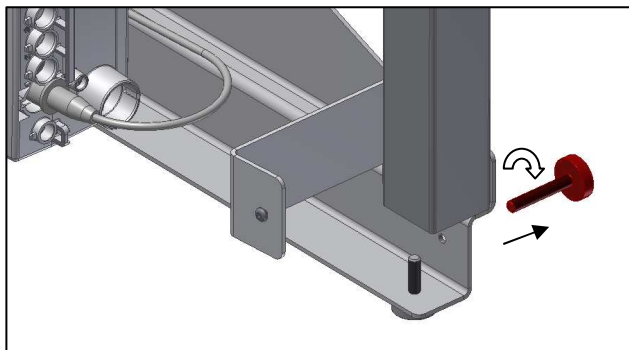

Stilleskrue justeres så  
den ligger an på  
væggen.

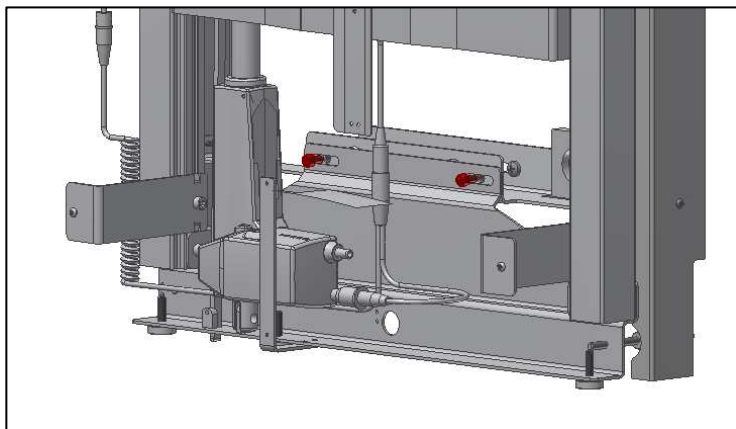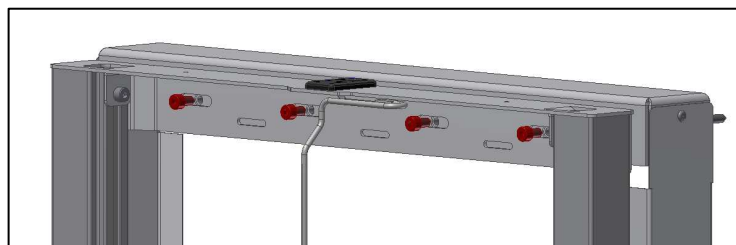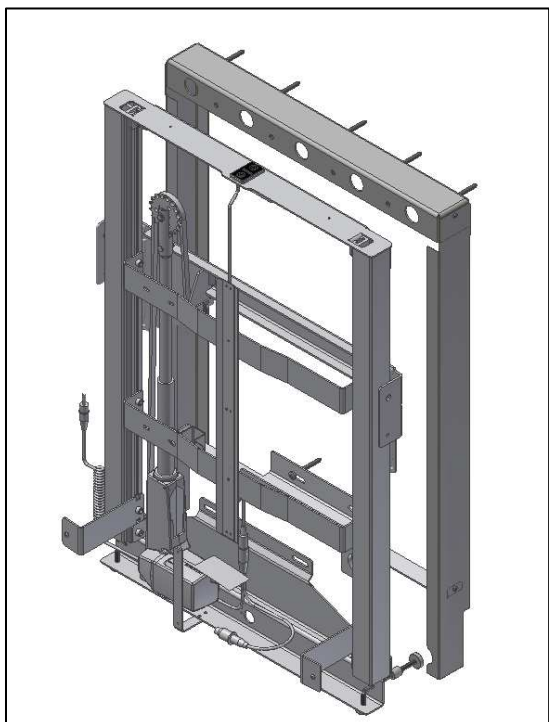



Ropox anbefaler at puslebordets funktioner gennemtestes 1 gang om året og at alle skruer og møtrikker efterspændes.

I tilfælde af fejl eller mangler bedes Ropox kontaktes hurtigst muligt. Indtil dette er løst/udbedret må puslebordet ikke anvendes.

**!! Vedligeholdelse af puslebordet må kun udføres af fagpersonale !!**

Hvis man ikke selv vil stå for denne gennemgang, kan Ropox kontaktes for at aftale et besøg af en servicetekniker. Se kontaktoplysninger sidst i denne manual.

Se venligst Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser på [www.ropox.com](http://www.ropox.com)



**Ropox A/S**

Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 78 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



**Ropox A/S**

Ringstedgade 221

DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 78 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)



**Ropox A/S**

Ringstedgade 221

DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 78 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.de](http://www.ropox.de)