

All-in-One Gålift

Brugermanual for sejl



Dec-08

ROPOX

Generelt om sejlet

Indholdsfortegnelse

Generelt om sejlet	Indledning	3
Anvendelse af sejlet	Løft fra stol/kørestol	4
	Placering i stol/kørestol	4
	Sejl for Gålift	5
	Farvekoder på løftestropper	5
Mærkning	Mærkning og størrelse	6
	Opbevaring	6
Vedligeholdelse	Dagligt check	7
	Månedlig vedligeholdelse	7
	Materiale	7
	Rengøring	7
Reklamationsfrist og CE-mærkning	Reklamationsfrist	8
	CE-mærkning	8

Ved henvendelse vedrørende sejl bedes følgende oplyst:

Kunde: _____

Sejlmodel/størrelse: _____

Sejlnummer: _____

År og måned: _____

Producent

Ropox A/S

Ringstedgade 221

4700 Naestved

Telefon: +45 55 75 05 00

Fax: +45 55 75 05 50

Info@ropox.dk

www.ropox.dk

Forhandler

Generelt om sejlet

OBS! Det er vigtigt, at brugeren er fortrolig med anvendelsen af sejlet og deres funktioner, samt at de fungerer uden problemer. For at opnå den bedst mulige sikkerhed skal alle brugere derfor gennemlæse denne Brugermanual inden brug.

Indledning

Denne brugermanual er din guide til at udføre et trygt og sikkert løft med Gålift Sejl. Du får ligeledes anvisninger på, hvordan du i praksis anvender sejlene.

Ropox A/S er kun ansvarlig for sejlenes sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis instruktionerne i Brugermanual overholdes.

Der kræves ikke kun en velfungerende lift for at foretage et effektivt og komfortabelt løft af en klient.

Det er vigtigt, at det anvendte sejl er beregnet til den pågældende opgave, samt at materialet og opbygningen af sejlene opfylder de strengeste krav, hvad angår komfort, sikkerhed og problemfri håndtering.

OBS!!

Inden løft af en klient skal du selv afprøve Gåliften.

Inden løftet af klienten påbegyndes, gennemgås følgende checkliste:

- Vælg den størrelse sejl, der skal anvendes, ved hjælp af den Quick-Guide og Facts-Label, som findes på alle sejl. Se side 6.
- Check det valgte sejl for skader og brug ikke sejlet, hvis det er beskadiget eller slidt. Vær specielt opmærksom på løftestropperne.
- Sørg for, at du er fortrolig med den lift, der skal anvendes, og at den fungerer normalt.
- Løft ikke en klient højere end nødvendigt.

OBS!!

Sejlene kan løfte op til 200kg – hvis klienten vejer mere, må standardsortimentet ikke anvendes.

Anvendelse af sejlet

OBS!!

Vær opmærksom på, hvordan klienten forholder sig til det at blive løftet. Nogle, for hvem mekanisk løft er nyt, kan føle sig urolige eller blive utrygge. Det er derfor vigtigt altid at informere klienten om, at han/hun skal løftes, at forklare proceduren og at berolige klienten.

Løft fra stol/kørestol

- Placer sejlet omkring klienten, som sidder i stolen/kørestolen. Luk mavebæltet omkring klienten og stram til, så det stadig er behageligt for vedkommende.
- Benstropperne føres ind mellem lårene, og gennem benstroppernes sorte løkker trækkes løftestropperne, som er placeret foran skuldrene. Vær opmærksom på, at de fire grå løftestropper er i samme højde, før de sættes på gaffelarmen.
- Forøg bredden mellem liftens ben, så liften kan køres ind til stolen.
- Kør ind mod klienten og placer hans/hendes ben på gulvet.
- Skub liften så langt ind mod klienten som muligt
- Sørg for at gaffelarmen er i nederste stilling.
- Placer sejlets løftestropper korrekt i gaffelarmens kroge. Kontroller at alle stropper sidder korrekt.
- Løft klienten få centimeter over stolesædet. - STOP - og kontroller at sejlet er korrekt ophængt.
- Når klienten sidder bekvemt i sejlet, løftes han/hun op og fri af stolen, indtil vedkommende er i stående stilling.
- Træk liften langsomt væk fra stolen - STOP - reguler sejl og løftehøjde, så klienten står bekvemt.
- Du kan nu starte gangtræningen.

Placering i stol/kørestol

For at placere en person i stol/kørestol gennemføres ovennævnte i modsat rækkefølge:

- Forøg bredden mellem Gåliftens ben og kør ind til stolen.
- Observer at personen er korrekt placeret i forhold til stolen og sænk langsomt liften.
- Kontroller at klienten er i korrekt position under hele proceduren.
- Når man skal hjælpe en klient tilbage i stolen, sænkes vedkommende ned, så han/hun lige akkurat rører stolen.
- Kan stolen tippes lidt bagover er det lettere at få klienten placeret korrekt.
- Er man to hjælpere, kan den ene trykke let på klientens knæ.

Anvendelse af sejlet

OBS!!

Når løft eller sænkning af klienten påbegyndes, skal hjulene på liften være ulåst, hvorimod de på kørestolen skal være låst.


Sejl for Gålift

Sejlene med de fire løftestropper er designet specielt til den gaffelformede løftearm på Gåliften. Med to stropper på forsiden og to på bagsiden får klienten en bedre balance og føler sig derfor mere tryk.


Alle sejl for Gåliften er fremstillet af farvet polyester og findes i fire størrelser.

Mærkning, Quick-Guide og Facts-Label gør det lettere at vælge den rigtige størrelse.

Alle løftestropper er forsynet med farvekoder for at lette håndteringen.

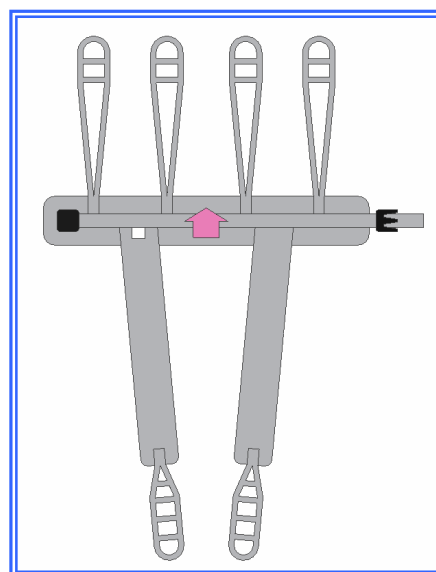

Farvekoder på løftestropperne

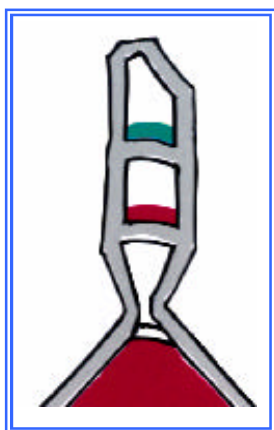

Stroppernes løkker har farvekoder, som gør det lettere at vælge den rigtige placering.

Der er tre forskellige løkker/farver at vælge imellem på de fire løftestropper og de to lyskestropper, hvorved placeringen kan ændres, så gangtræningen bliver så bekvem som muligt.

Det er vigtigt, at der anvendes samme farvekode på begge sider, f.eks. de to løftestropper på bagsiden.



Hvis der kræves øget justering og placering, kan der anvendes 15 og 30 cm løkker for stropperne.

Mærkning

Mærkning og størrelse

Alle sejl er forsynet med en "Quick-Guide" og en "Facts-Label" på bagsiden.




Ved hjælp af "Quick-Guiden" er det muligt hurtigt at se, hvad der er op og ned samt ind og ud på sejlet.

Endvidere er der angivet max. belastning samt vaskeanvisning.

Navnet på klient eller afdeling kan skrives på sejlet sammen med datoen for første ibrugtagning.

Af den påsatte "Facts-Label" fremgår sejlets størrelse, type/navn samt produktionstidspunkt (år og kvartal).

Denne "Facts-Label" anvendes også til at vælge, hvilken størrelse, der skal anvendes ud fra klientens højde og vægt. Disse angivelser er dog kun vejledende, da den pågældende klients anatomi kan resultere i en anden sejlstørrelse.

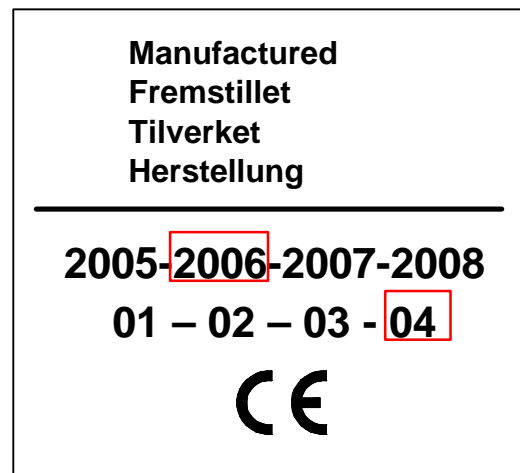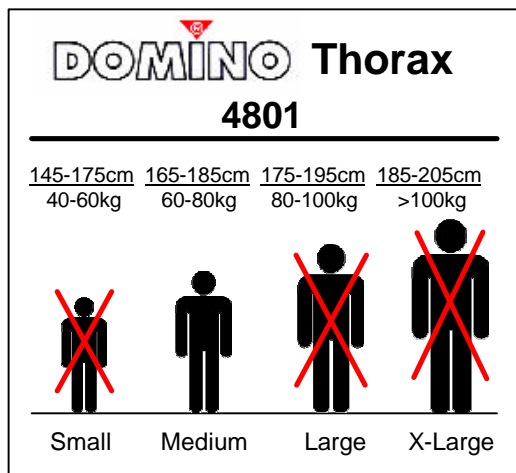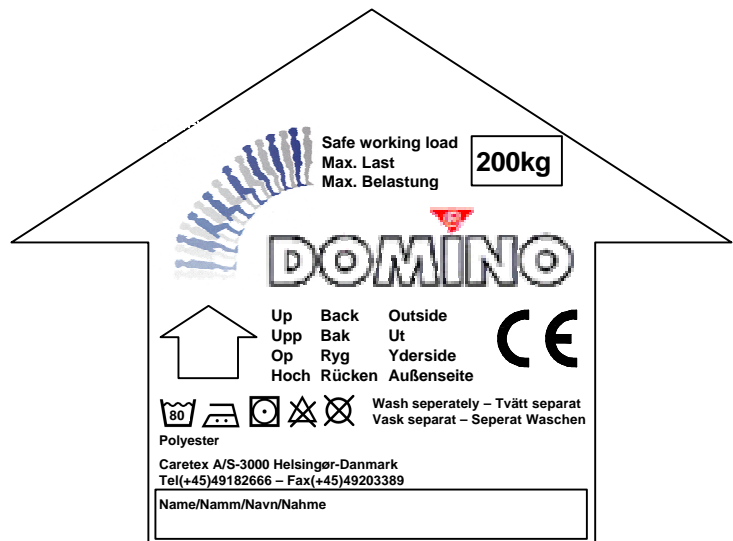

Opbevaring

Sejlene må ikke opbevares i stærkt og direkte sollys eller i for stærk varme eller høj fugtighed, da deres levetid derved kan blive reduceret.

Den bedste opbevaringsmåde er simpelthen at hænge sejlene op i stropperne på en krog på væggen. Sørg for ikke at folde sejlene i de skumfyldte sektioner.

Vedligeholdelse

Sejlene skal altid før brug kontrolleres for tegn på slid eller brud.

Der skal med regelmæssige mellemrum foretages en grundig inspektion af sejlene.

Dagligt check

- Check at sejlene er rene. Hvis ikke, sendes de til vask.
- Check sejlene for slid samt at sømmene er intakte og ikke flossede. Slidte sejl skal udskiftes.

Månedlig vedligeholdelse

- Sejlene eftergås omhyggeligt.
- Følgende skader kan reducere sikkerheden. Konstateres sådanne skader, skal produktet omgående kasseres:
- Hak, huller eller brændte pletter i stof eller stropper.
- Kemisk angreb.
- Knækkede eller slidte syninger.
- Slid.
- Beskadiget låse/åbnemekanisme.

OBS!!

Er der tvivl om sejlet tilstand, MÅ DET IKKE ANVENDES

Materiale

Sejlene er fremstillet af et polyestermateriale som gør det stærkt og komfortabelt med en friktionsagtig belægning på indersiden. Sejlet får derved en bomuldsagtig overflade, som bevirker, at det ikke glider, og samtidig er behagelig for brugeren. Materialet er brandhæmmende.


Rengøring

Sejlet vaskes i varmt vand på op til 80°C tilsat et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig opløsningsmidler.

Eventuelle rengøringsmidler fjernes ved at skylle sejlet grundigt i varmt vand.

Det er bedst at lade sejlet tørre naturligt ved rumtemperatur, hvilket tager ca. en time. Tørring kan også ske i tørretumbler ved lav varme.

Sejlet vaskes separat første gang for at undgå misfarvning.

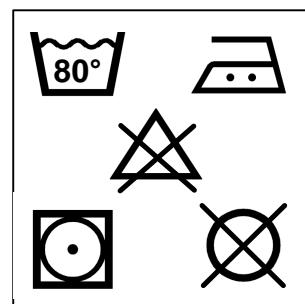

Reklamationsfrist og CE

Reklamationsfrist

Se Generelle Salgs- & Leveringsbetingelser på www.ropox.dk

CE-mærkning

CE Sejlet til Gåliften er CE-mærket, og er dermed i overensstemmelse med funktions- og sikkerhedskravene i direktivet "Medicinsk Udstyr. Overensstemmelseserklæring kan rekvireres. Sejlet er i risikogruppe 1.

Det er testet hos Hjælpemiddelinstittet efter gældende regler i Standard DS / EN ISO 10535, „Hoists for the transfer of disabled persons – requirements and test methods“.



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Denmark

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05
50

E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com