

Brugsanvisning

GRİPO

Konstrueret og produceret i henhold til:

- Essential Requirements of EU Directive 93/42/EEC (CE mærket)
- Relevante dele af EN 12182

INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Tilpasset information

For information tilpasset til brugere med syns-, læse-, skrive- og kognitive svækkelser, henvend dig til salgspersonen eller terapeuten.



Anvendelsesområde

Dette produkt er tiltænkt til brug indendørs i private hjem eller på institutioner. Gripo-stangen skal have rumtemperatur, inden den sættes op.

Brugerens vægt

Brugerens maksimale vægt 150 kg.

Vedligeholdelse

Gasfjederens levetid kan forlænges, hvis Gripo stangen spændes op mindst 2 gange om året.

Rengøring

Alle dele kan vaskes med husholdningsrengøringsmidler, maksimalt 60°C. Undgå stærke opløsningsmidler.

Mål

Vægt	4,5 kg
Højde	se tabel næste side
Bredde topplade	290 mm


Transport

Under transport skal produktet være sikret på en sådan måde, at det ikke kan medføre fare for passagerer eller andre genstande.

BRUGERINFORMATION

Placering af serienummer

Serienummeret er placeret nederst på ydersiden af aluminiumsrøret på produktet.

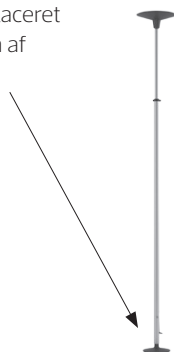

Tiltænkt brug

Den er tiltænkt til brug for personer, som har behov for hjælp eller støtte for kunne udføre deres daglige gøremål.

Genbrug

Stang	Aluminium
Sorte plastdele	PA6
Hvide gummiringe	Gummi
Andre dele	Stål, kobber og aluminium

Alle dele skal genbruges efter lokale bestemmelser; tag venligst kontakt med din lokale genbrugsplads.

Gripo

Art. Nr.35100



Sikkerhed

Dette produkt er tiltænkt til anvendelse i private hjem eller på institutioner.

- Brug ikke produktet, hvis den røde sikkerhedsring øverst på stangen er synlig.
- Vurder altid klemmefare mellem stangen og andre møbler/genstande. Vær især opmærksom på afstanden mellem stang og et andet møbel, og vurder afstanden således, at brugeren ikke kan komme i klemme mellem stangen og møblet.
- Monter ikke produktet på løse genstande, som ikke er fastgjort sikkert til loft eller gulv, som fx gulvmåtter, plader eller lignende.
- Lad ikke børn lege med produktet.
- Må ikke placeres på flader, som ikke er plane og parallelle.
- Ved montage i vådområder, brug skridsikring.
- Produktet må ikke modificeres eller på anden måde ændres, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug ikke produktet med andet tilbehør end beskrevet i denne brugsanvisning.
- Sænk ikke produktet ned i vand eller andre væsker.
- Vask ikke produktet med maskinopvaskemiddel, klor eller acetone.
- Vær forsigtig ved åbning af emballagen, så hverken du selv eller produktet bliver beskadiget.

Gripo består af:

- 1x Bundplade (den mindste)
- 1x Topplade (den største)
- 1x Stang
- 1x Gasfjeder
- 1x Brugsanvisning

Varianter

Art. Nr.	Beskrivelse	Loftshøjde
35100	Gripo	210-300 cm
35105	Gripo, Lang	260-320 cm
35106*	Gripo, Plus	225-300 cm
35202	Gripo, Special	Lavere end 210 cm

* Denne udgave har 15 cm længere yderrør og passer til dem, som har brug for at fastgøre tilbehøret højt oppe på stangen, evt. ønsker at bruge stangen til træning.


Montering af GRIPo

Art. Nr. 35100

Art. Nr. 35105


Art. Nr. 35106

Art. Nr. 35202

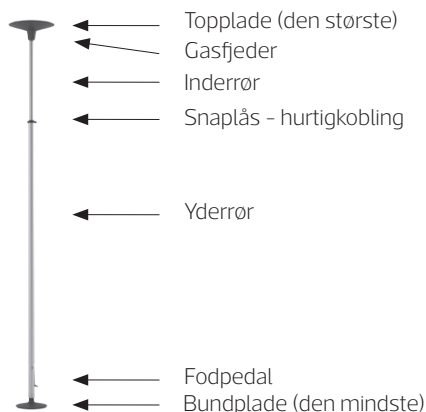

Montering af Gripo mod loft

Inden Gripo monteres, skal man undersøge, hvilken slags loft, det er. Ved gipslofter er det meget vigtigt, at Gripo monteres sådan, som tegningen viser. Undgå at placere Gripo mellem loftspær også ved spånpladelofter.

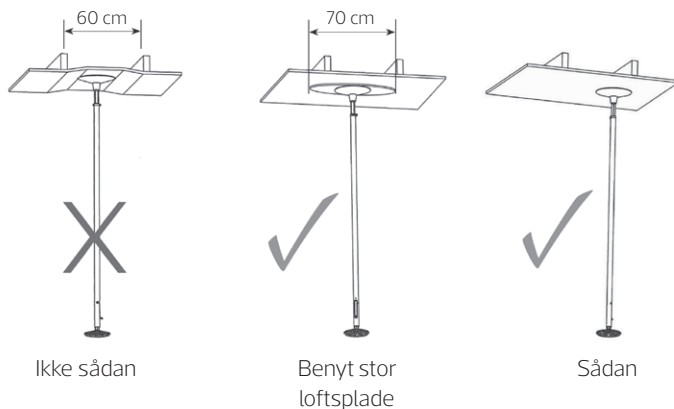

1


Placer stangen på den lille bundplade

Placer gasfjederen på toppen af inderrøret og skub gasfjederen mod det røde sikkerhedsmærke.

Placer den store topplade på toppen af gasfjederen.



Kraften, som virker mod loftet, er 100 kg.

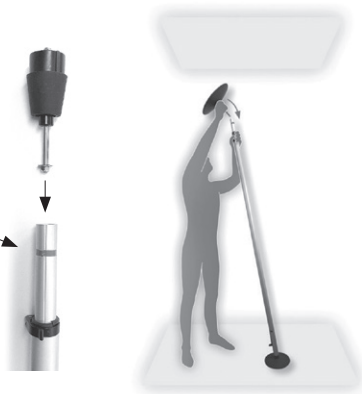

2


Placer stangen på et egnet sted.

3

Tag fodpedalen ud.

4

Åbn hurtigkoblingen

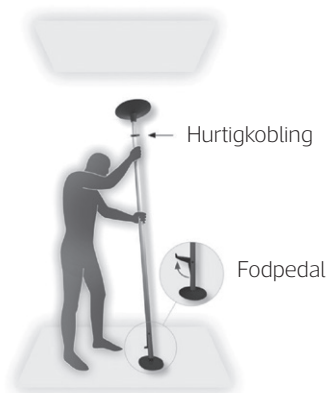

5

Skub inderrøret op indtil toppladen når loftet, mens bundpladen fortsat holdes i kontakt med gulvet.

Sørg for at stangen er lodret.



6

Roter inderrøret med uret, således at inderrøret låses fast til yderrøret.



7

Lås hurtigkoblingen fast.



8

Tryk fodpedalen ned.

9

Check at den røde markering er væk.

Demonter stangen hvis den røde markering er synlig og start fra punkt 2.



Pas på at den røde markering ikke er synlig ved brug. Hvis den kommer frem – tag stangen ned og sæt den op påny. Husk at dreje det inderrøret sådan, som det er beskrevet i punkt 6.

Demontering

Åbn hurtigkoblingen (figur 4) og tag fodpedalen op (figur 3). Drej om nødvendigt inderrøret mod uret.